



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado de las vendas de compresión para la parte inferior de la pierna Circaid

Circaid Lower Leg Compression Wrap

Cómo colocarse las vendas

► Siga el vídeo para mejores resultados

Si su venda tiene un panel EZ-On (un cuadrado de seda negro en la parte interior de la pantorrilla)

1. Primero, póngase el calcetín incluido con la venda. La venda no debe estar en contacto directo con la piel.
2. Deslice la pierna a través del panel EZ-On y tire de la envoltura hacia arriba para que quede justo debajo de la rodilla.
3. Ajuste la correa inferior sin apretar. Suba por la pierna, asegurando cada correa con leve solapamiento.

Si su envoltura no tiene un panel EZ-On

1. Empieza poniéndote el calcetín incluido. La venda no debe tocar la piel directamente.
2. Tome la correa superior de la venda y ajústela bien alrededor de la pierna. A continuación, vaya bajando por la pierna, tirando de cada correa y asegurándola con un pequeño solapamiento. Asegúrese de que cada correa quede bien ajustada.

Ambas versiones de esta venda usan un sistema de presión integrado (BPS). Alinee la flecha negra de la tarjeta con una línea negra de la venda. Luego tire de la correa hasta alcanzar el nivel de compresión que coincida con la barra de color de la tarjeta BPS. Repita con cada correa.

CONSEJO ÚTIL - a lo largo del día, la faja puede aflojarse ligeramente, por lo que es recomendable volver a comprobar las correas con la tarjeta BPS para asegurarse de que todo sigue ajustado y ofrece el soporte adecuado.

Cómo quitar la venda

Para quitar esta venda, desabroche las tiras de velcro y quítese la venda de la pierna. Vuelva a pegar el velcro a la venda.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Si su piel presenta manchas rojas que permanecen rojas durante más de 15 minutos después de quitarse la venda, deje de usarla, tome una foto de la mancha roja y comuníquese con nuestra oficina de inmediato.

Instrucciones de limpieza

Lave esta envoltura a mano con agua tibia y jabón suave. Enjuáguela bien y exprima el exceso de agua sin retorcerla. También puede lavarla en la lavadora dentro de una bolsa para ropa en ciclo delicado, pero no la ponga en la secadora. No use lejía ni suavizante. Déjela secar en posición horizontal y asegúrese de que esté completamente seca antes de volver a usarla.

Horario de uso

Por lo general, estas vendas se usan mientras está despierto y se retiran cuando se acuesta o se baña. Su médico le indicará su horario específico.